

Bruksanvisning

Zoomax Snow

Håndholdt elektronisk lupe



ZOOMAX

V1.1

Innholdsregister


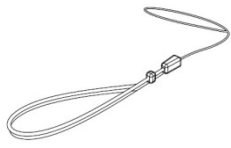




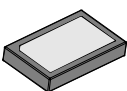
Beskrivelse.....	3
Innhold i esken.....	3
Beskrivelse av enhet:.....	4
Komme i gang.....	5
Batteri installering	5
Lading av batteri	6
Montere bærestropp	6
Funksjoner	7
Slå av og på.....	7
Justere forstørring	7
Fargevalg.....	8
Frys bilde	9
Skrijving	9
Skru av/på knappelyder (pip).....	10
Skru av/på kameralys	10
Justere lys på skjermen.....	11
Tilkobling til TV	11
Innstiling av minnefunksjoner	12
Feilsøking.....	12
Sikkerhet	13
Spesifikasjoner:.....	14

Beskrivelse



Zoomax™ Snow er en lett håndholdt elektronisk lupe med 4.3" LCD skjerm. Den forstørrer fra 2x-16x, 10 farge og kontrastvalg, og mulighet til å fryse bildet. Zoomax har også strømsparingsfunksjon.


Innhold i esken

Zoomax™ Snow esken inneholder følgende:

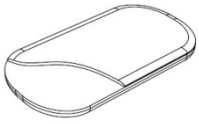 <p>Elektronisk lupe</p>	 <p>bærestropp</p>	 <p>Bruksanvisning</p>
 <p>Video kabel</p>	 <p>Beskyttelseveske</p>	 <p>Strømforsyning batterilader /</p>
 <p>Oppladbart lithium batteri</p>		


Beskrivelse av enhet:

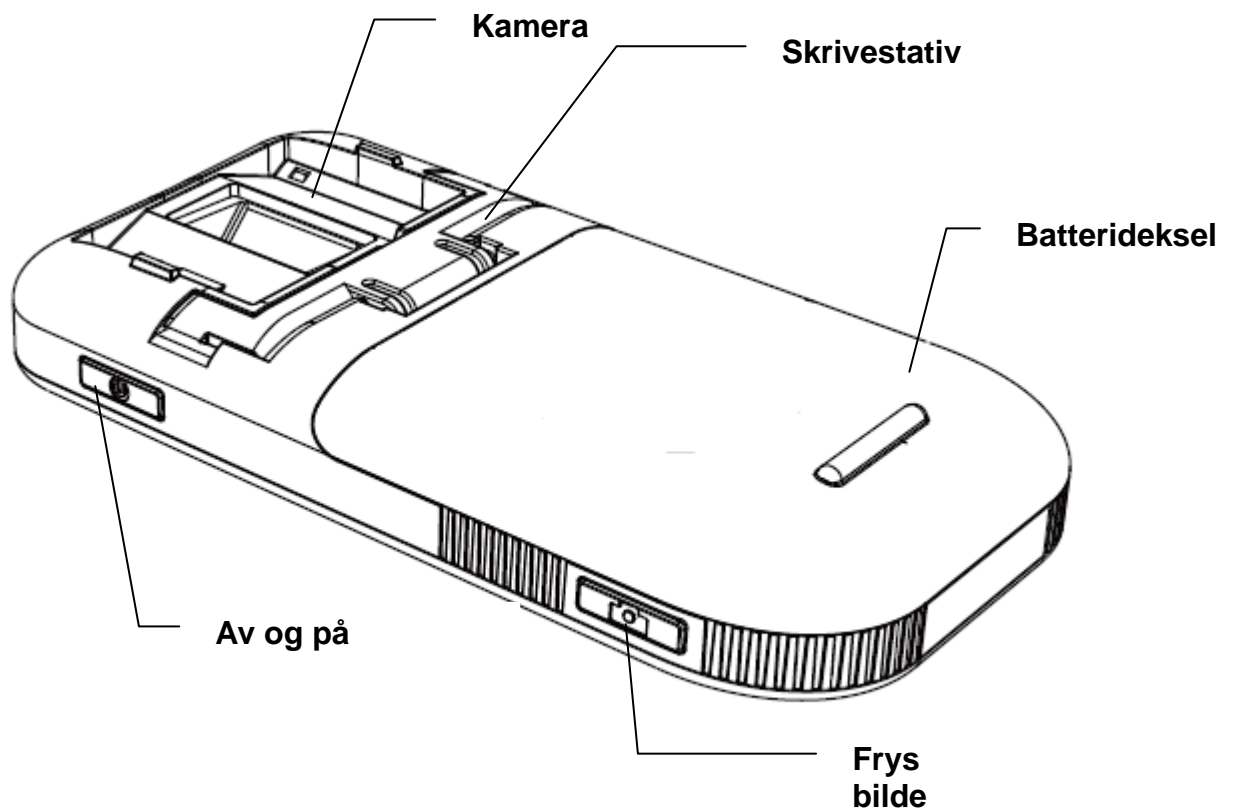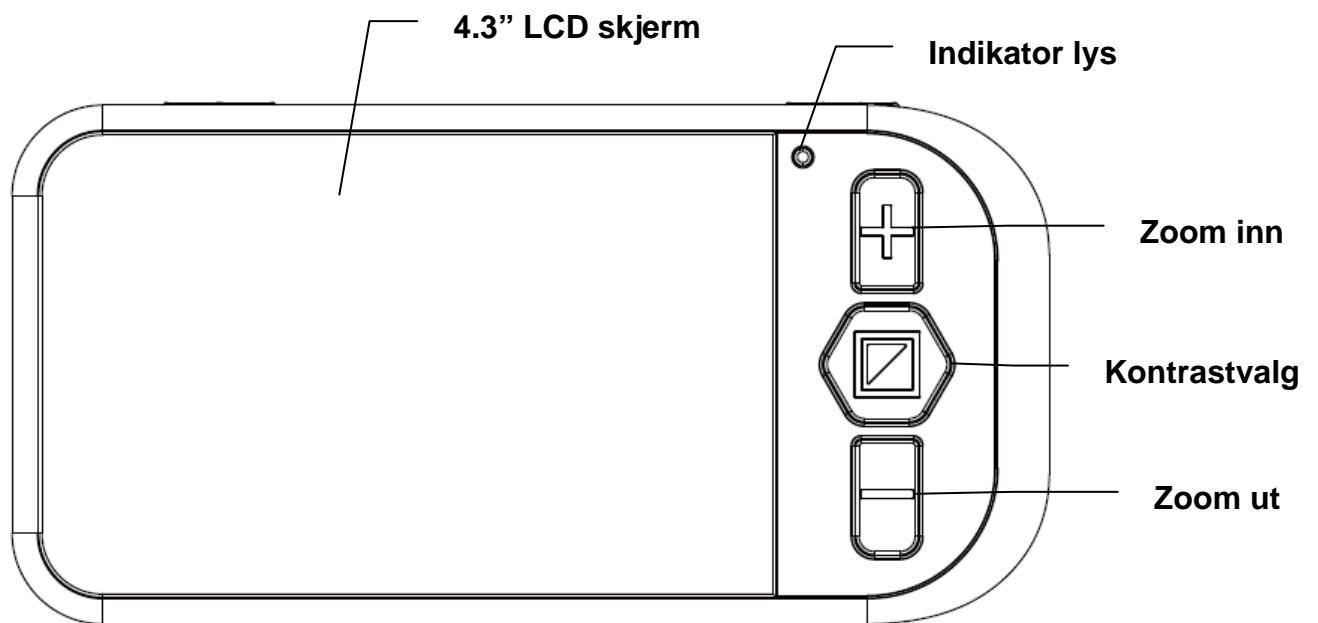

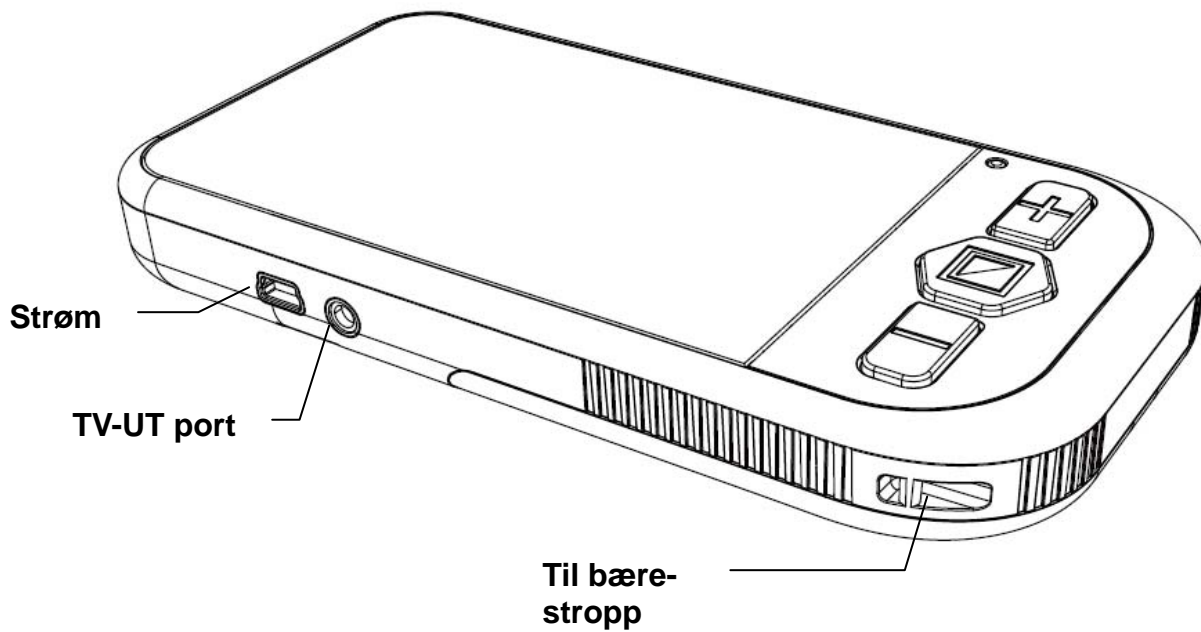

Komme i gang


Batteri installering

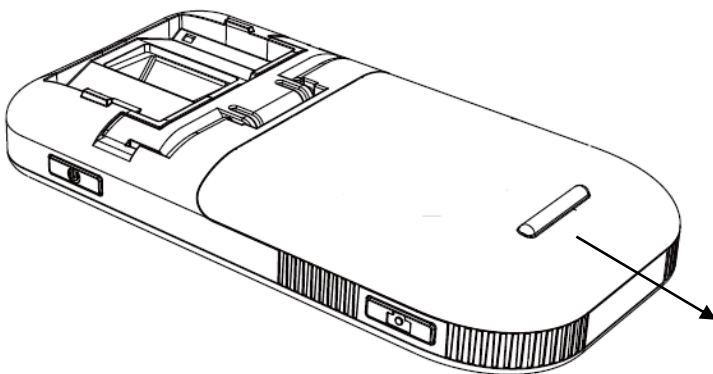


Installer batteri som følgende:

1. Snu enheten med baksiden opp
2. Press og skyv for å åpne batterideksel
3. Sett i batteri
4. Sett tilbake deksel og skyv det til låst posisjon

Lading av batteri

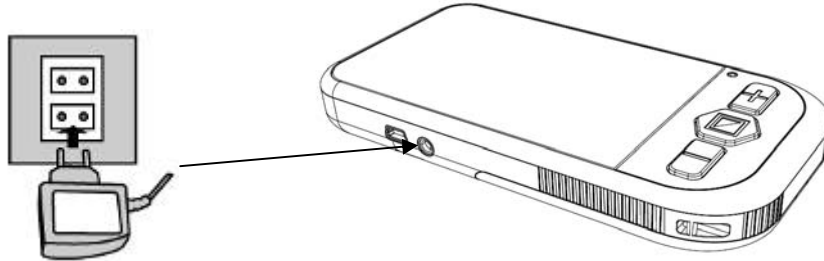

Batteriet bør fullades før du tar i bruk lupen.

- Tilkoble strømforsyningen til USB porten og sett kontakten i veggutaket. Ladeindikatoren vil lyse rødt ved lading.
- Når batteriet er fulladet vil ladeindikatoren slukke.
- Hvis batteriindikatoren  på skjermen ikke lyser ved påslag er batteriet nesten utladet, og du bør lade på nytt.

Lading av batteriet tar ca 4 timer, og et fulladet batteri vil vare ca 3,5 timer. Vi anbefaler ekstra batteri hvis du ikke har tilgang på strøm over tid.


Montere bærestropp



- Tre først den lille løkken på enden av lenken gjennom åpningen.
- Tre så den andre enden gjennom den lille løkken og stram til.

Funksjoner

Slå av og på

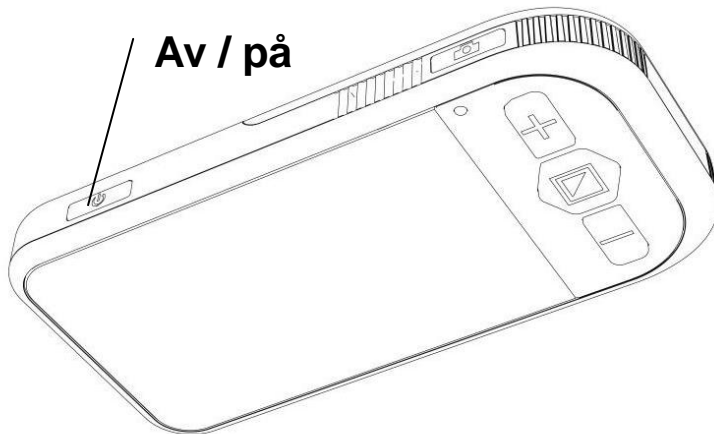


Slå på: Trykk og hold av/på knappen i 2 sekunder. (som vist på tegning)
Den grønne indikatoren tennes og enheten er klar til bruk.

Slå av: Trykk og hold av/på knappen i 2 sekunder. Den grønne indikatoren slukkes og enheten er slått av.


- For å spare strøm vil lupen slå seg av etter 3 minutter hvis den ikke har vært i bruk.

Justere forstørring

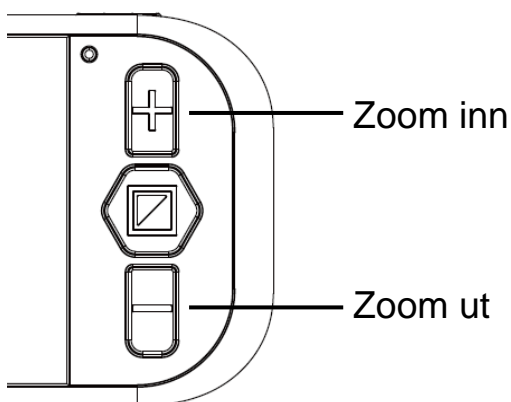

- Trykk "+" knapp for å zoome inn, og trykk "-"knappen for å zoome ut.
Forstørring flatt på papir: fra 3.6 til 16 ganger forstørring.
Med skrive støtte: 2-10 ganger forstørring.

Fargevalg

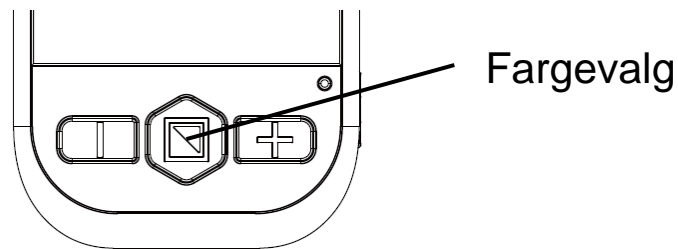

Det er to muligheter å bruke dette på:

1. Normalmodus

I normalmodus, trykk på fargevalgknappen for å gå gjennom de forskjellige valgene:

- Naturlige farger
- Gråskala
- Høy kontrast hvit tekst på sort bakgrunn
- Høy kontrast sort tekst på hvit bakgrunn
- Høy kontrast hvit tekst på blå bakgrunn
- Høy kontrast blå tekst på hvit bakgrunn
- Høy kontrast gul tekst på sort bakgrunn
- Høy kontrast sort tekst på gul bakgrunn
- Høy kontrast blå tekst på gul bakgrunn
- Høy kontrast gul tekst på blå bakgrunn

2. Favorittmodus

I favorittmodus, trykk på fargevalgknappen for å gå gjennom de tre basisvalgene: naturlige farger, din favoritt kontrastfarge og motsatt (slik som hvit på blå & blå på hvit). Dette gjør det ofte enklere ved bruk.


1) For å komme til favorittvalg, velg først din favorittfarge i normalmodus, så holder du fargevalgknappen inne i 2 sekunder til du hører et pip.

NB: Hvis du velger favorittmodus, og står i fullfarge eller gråskala, vil valgene i favorittmodus bli fullfarge, sort på hvit og hvit på sort.

2) For å gå tilbake til normalmodus, trykk og hold knappen inne i 2 sekunder til du hører et pip;

3) Hvis du slår av enheten mens du står i favorittvalg, vil den huske det til neste gang du slår på.


Frys bilde

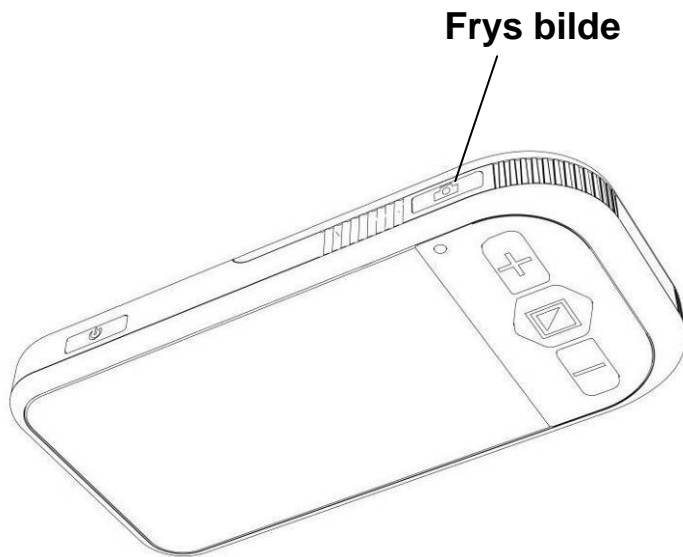

Bruk Frys-knappen for å "lagre" bilde.


- Sett enheten over objektet / teksten
- Trykk på Frys-knappen
- Du kan nå ta lupen til deg for å studere objektet / teksten nærmere. Du kan også forstørre bildet eller forminske bildet med +/- knappene og endre fargevalg med fargevalgsknappen.
- Trykk frys-knappen igjen for å gå ut av frysmodus.

Skriving

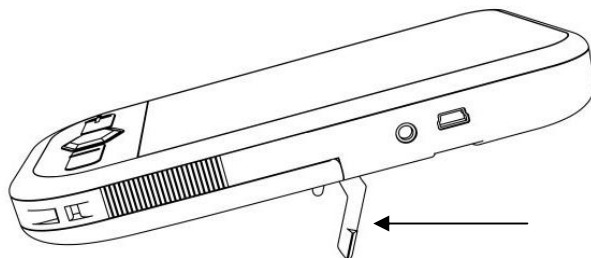

- Trekk ut skrivestativet på undersiden av lupen.
- Skriv på undersiden av kamera.

Skru av/på knappelyder (pip)

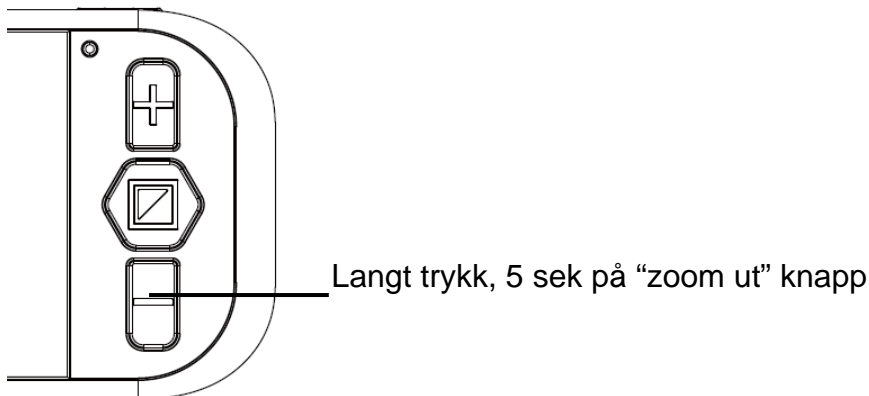


Som standard er det ingen lyd ved knappetrykk.

For å skru på, trykk og hold "Zoom ut" knappen i 5 sekunder til det piper 2 ganger.

For å skru av, trykk og hold "Zoom ut" knappen i 5 sekunder til det piper 1 gang.

Skru av/på kameralys

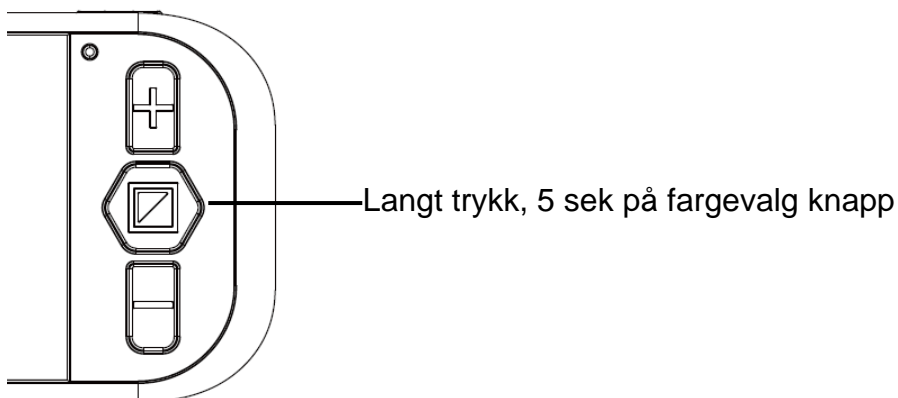

Som standard er kameralyset på ved bruk.

For å skru lyset av, trykk og hold "fargevalgsknappen" i 5 sekunder til det piper 2 ganger. (fortsett og hold hvis du bare hører ett pip).


For å skru lyset på, trykk og hold "fargevalgsknappen" i 5 sekunder til det piper 2 ganger. (fortsett og hold hvis du bare hører ett pip).

Justere lys på skjermen

Hold tasten "Frys" og "zoom inn (eller zoom ut)" for å komme til menyen for justering av lys. Trykk så "zoome inn" hvis du vil øke lysstyrken og "Zoom ut" for å redusere den. Trykk på "fargevalg" for å bekrefte lysstyrke og avslutt. Hvis du ikke gjør endringer i løpet av 5 sekunder vil den avslutte menyen automatisk.

Tilkobling til TV

Koble audio/video kablen til lupen og Tv apparatet.

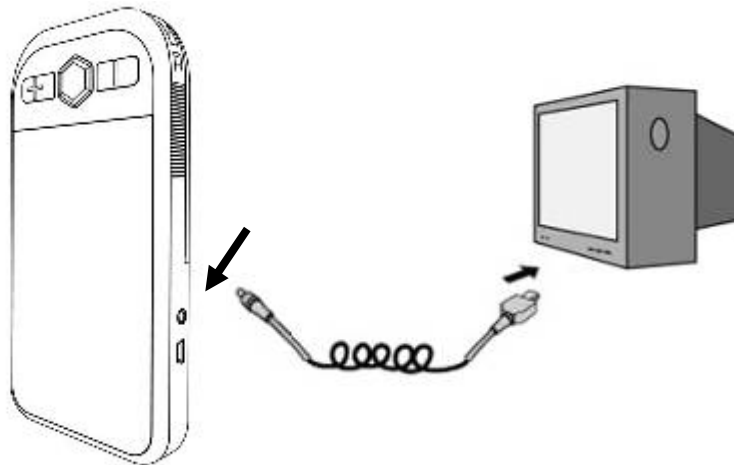

- Etter tilkobling vil skjermen på lupen skru seg av automatisk.
- For å velge riktig TV standard, trykk og hold frys-knappen i 3 sekunder.
- Bruk "+" / "-" for å velge **PAL** (i norge) eller NTSC, Så trykker du "fargevalg" knappen for å bekrefte. Apparatet vil huske dette til neste gang.
- Når du kobler fra AV kablen vil lupen automatisk gå tilbake til LCD-visning.

Strømsparingsfunksjon:

Hvis lupen ikke har vært i bruk på 3 minutter vil den slå seg av.

Innstiling av minnefunksjoner

Den elektroniske lupen vil automatisk huske de fleste innstillinger, (slik som fargevalg, forstørring, tv format, pip ved knappetrykk lys) og bruke de neste gang du slår på apparatet.

Feilsøking

Problem	Løsninger
Svart skjerm	Kontroller at strømmen er på. Lad batteriet. Redusere forstørrelsesnivået. Kontroller at bildet er under kamera.
Enheten slår seg ikke på.	Bytt eller lad batteri
Bildet er mørkt eller uskarpt.	Se til at Snow ligger flatt mot objekt.
Batteri lader ikke selv om batterilader er tilkoblet.	Se til at uttaket har strøm og pluggen er satt helt inn i lupen.
Flekker eller urenheter på skjermen.	Rens kamera og skjermen med myk klut.
Teksten er for liten til å lese.	Justere forstørrelsen opp til passende nivå. Tilkoble evt. til TV med den medfølgende AV-kabelen.
Teksten er for stor.	Justere forstørrelsen ned til passende nivå. Prøv å flytt enheten litt bort fra emnet.
Enheten er koblet til en TV, men ikke noe bilde vises på TV-skjermen.	Se til at tv er på. Sjekk at kabelen er riktig tilkoblet og at utdata (PAL) er riktig.
Skjermen er frosset eller forvrengt eller andre problemer som ikke er nevnt i denne håndboken.	Slå apparatet av og på. Fjern og bytt batteriet.

Hvis problemet ikke er angitt ovenfor, kan du kontakte din lokale forhandler.

Sikkerhet

Hvis du vil beholde din elektroniske lupe i god forfatning, les følgende sikkerhetsinstruksjoner nøye:

- Utsett ikke apparatet for overdreven varme eller direkte sollys. Dette for å unngå fare for brann.
- Unngå våtområder, regn, væsker og kjemikalier.
- Bruk alltid apparatet i et miljø der temperaturen er mellom 10 og 40 ° Celsius.
- Ikke forsøk å reparere apparatet eller åpne deksler. Garantien blir da ugyldig. Kontakt din forhandler for reparasjon.
- Husk alltid å koble fra enheten før rengjøring. Bruk bare en fuktig, myk, løst klut. Ikke bruk alkoholholdige løsningsmidler eller andre rengjøringsmidler.
- Bruk kun den medfølgende strømadapteren til å lade batteriet. Andre strømforsyninger eller batteriladere vil kunne ødelgge batteriet.

Spesifikasjoner:

- Forstørring: 2x to 16x (optisk og digital)
- 10 visningsmoduser: (fullfarge, grå, høykontrast hvit på svart, høykontrast sort på hvit, høykontrast hvit på blå, høykontrast blå på hvit, høykontrast gul på svart, høykontrast sort på gul, høykontrast blå på gul, høykontrast gul på blå)
- Fokus: Autofokus
- Skjerm: 4.3 tommer (109mm) widescreen TFT
- TV utsignal: PAL / NTSC
- Strømsparing: Enheten slår seg automatisk av etter inaktivitet i tre minutter
- Batteri: oppladbart lithium batteri. 3.5 timer ved kontinuerlig bruk
- Batterinivå indikator: Ja
- Strømforsyning: inn: 110—240V, ut: 5V/1A
- Ladetid: 4 timer
- Vekt: 215 gram
- Medfølgende tilbehør: brukermanual, oppladbart batteri, strømadapter, bærestropp, beskyttende veske, AV-kabel
- Betingelser for lagring og bruk:
Fuktighet < 70%
Temperatur: 10-40 °Celsius

For notater:

