


# I-LOVIEW 7 FULL HD

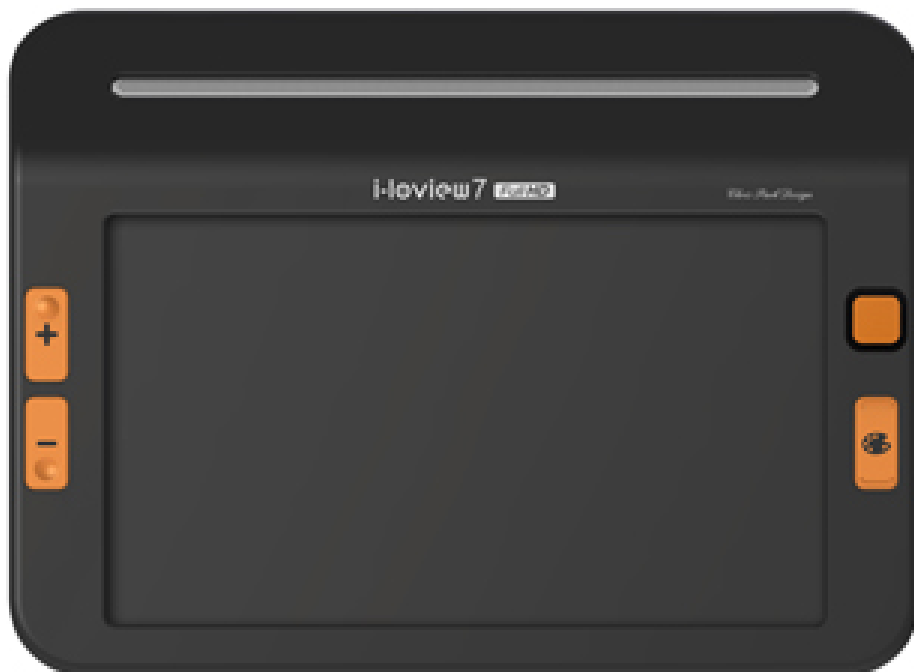

## Bruks og monteringsanvisning

## Innholdsregister

Introduksjon.....	s. 3
Produktets innhold .....	s. 4
Instruksjoner før bruk .....	s. 4
Konfigurasjon .....	s. 5
Funksjoner og hurtigtaster.....	s. 9
Lyd på/av.....	s. 9
Batteri status.....	s. 9
Lagring av bilde .....	s. 9
Gjenopprett fabrikkinnstillinger .....	s. 9
Strømsparerer modus .....	s. 9
Meny .....	s. 10
Tekniske data .....	s. 12

## Introduksjon



## Produktets innhold

Produktet inneholder følgende deler:



- I-LOVIEW 7 (700Z)
- SD minnekort
- Strømforsyning
- Bæreveske
- Bruksanvisning
- Fiberklut for rengjøring

Batteriet må lades helt opp i ca. 4 timer første gang. Vennligst koble den medfølgende strømadapteren til DC-inngangen for å lade batteriet.

Fjerne LCD beskyttelsesfilmen før du bruker enheten.

Vær forsiktig så du ikke lar fremmedlegemer dekke til katedralinsen. Hvis noen fremmedlegemer er på linsen, tørk det av med den medfølgende mikrofiberklut.

## Konfigurasjon

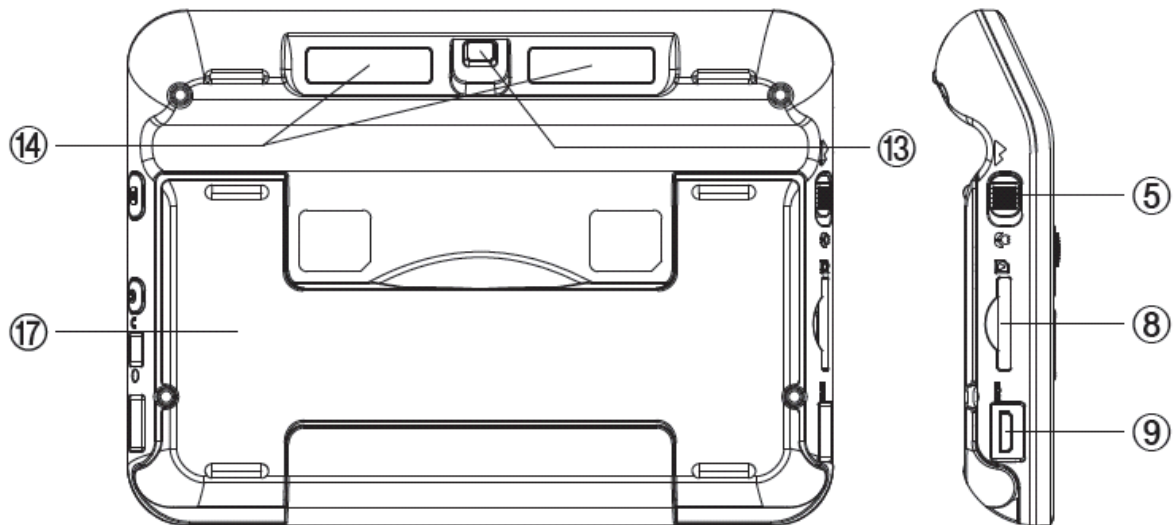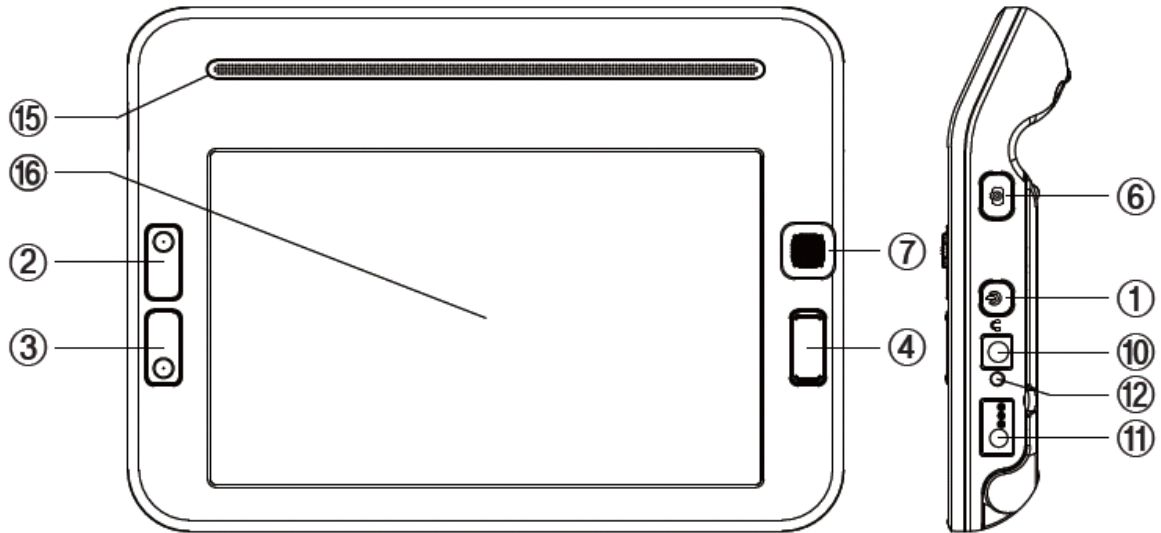

## 1. Av/på

Strøm på: For å slå på enheten, trykker du på knappen i 2 sekunder eller mer.

Strøm av: For å slå av enheten, trykker du på knappen i 2 sekunder eller mer igjen.

Hvis du opplever en operasjon feil eller funksjonsfeil, trykk på knappen for 6 sekunder for å slå av systemet.

## 2. Zoom ⊕ knappen

Trykk på knappen for å forstørre skjermbildet.

## 3. Zoom ⊖ knappen

Trykk på knappen for å redusere størrelsen på skjermbildet.

## 4. Fargemodus knapp

Bildet på skjermen kan sees i åtte (8) fargemodi:

- Naturlig fargemodus
- Hvit tekst på sort bakgrunn
- Svart tekst på hvit bakgrunn
- Gul tekst på sort bakgrunn
- Svart tekst på gul bakgrunn
- Grønn tekst på svart bakgrunn
- Blå tekst på gul bakgrunn
- Gul tekst på blå bakgrunn

## 5. Visningsmodus bryter

Ved å benytte denne knappen kan du velge mellom nærbilde og avstandsbilde.

Close-Up Mode (Blomst ikon): Når du ser på objekter innenfor 1 meter fra deg.

Avstandsmodus (Fjell ikon): Når du ser på ting mer enn 1 meter unna deg.

## 6. Frys knapp

Trykk kort på knappen og bildet på skjermen fryser. Du kan deretter zoome inn / ut på stillbildet og justere farge og lysstyrke på skjermen. Trykk på knappen igjen for å frigi skjermen igjen.

## 7. Joystick

Du kan flytte joysticken til venstre, høyre, opp eller ned for å navigere gjennom menyer eller endre menyvalget. Trykk på Jog-knappen for å velge ønsket menyvalget.

### a. Normal modus og stillbilde

Du kan flytte rundt et forstørret bilde ved å bevege Jog-knappen til venstre, høyre, opp eller ned.

### b. Menyskjermen

Du kan gå til andre menyer ved å bevege joysticken opp eller ned, og endre menypunktet ved å bevege joysticken til venstre eller høyre. Trykk på joysticken for å aktivere ønsket element.

## 8. SD-kortspor

Brukes til å lagre bilder og overføre bildefiler til andre enheter.

9. HDMI utgang

Du kan koble din i-loview 7 til en TV eller dataskjerm. På HDMI utgangen får du funksjoner som forstørring opp/ned og frys bilde.

10. Lydutgang

11. Strømkontakt

Du kan sette inn strømadapteren her for å lade batteriet.

12. Batteriladingsindikator

Den viser batteriets ladestatus. Indikatoren er rød når Batteriet lades og skifter til grønt når de er fulladet.

13. Kamera

Vær forsiktig så du ikke la fremmedlegemer dekke over kameralinsen. Hvis dette skjer, tørke det av med den medfølgende mikrofiberkluten.

14. LED lys

15. Høytaler

16. LCD skjerm

17. Stativ



## Funksjoner og hurtigtaster

### **1. Lyd av/på**

Du kan slå lyden av / på ved å trykke på og holde nede Zoom ⊕ knappen og fargemodus knappen i 3 sekunder eller mer.

### **2. Batteristatus**

Status for gjenværende batteritid vil ikke normalt vises, men Indikatoren viser når batteriet faller til 30%. Du kan sjekke status på gjenværende batteritid ved å trykke på Zoom ⊖ knappen og fargemodus knappen samtidig i 3 sekunder eller mer. Ikonet forsvinner hvis du trykker på knappene igjen.

### **3. Lagre bilde**

Hvis du trykker og holder nede Frys-knappen i 3 sekunder eller mer vil et kameraikon vises på skjermen. Bildet på skjermen kan lagres som en bildefil til SD-kortet. Når bildet er lagret vil kameraikonet forsvinne.


### **4. Gjenopprett fabrikkinnstillinger**

Hvis du flytter joysticken opp og trykker på fargemodus knappen samtidig i 3 sekunder eller mer, kan du tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.

### **5. Strømsparerer modus**


Hvis du lar enheten være på og ubrukt i tre minutter går det automatisk i strømsparingsmodus. Hvis enheten er ytterligere 3 minutter ubrukt slår den seg av automatisk

## 6. Meny

For å vise menyen trykker du på Zoom  knappen knappen og fargemodus knappen samtidig i 3 sekunder eller mer.

### Fotovisning

Dette gjør at du kan vise bilder som er lagret på SD-kortet. Du kan vise andre bilder ved å bevege joysticken til venstre eller høyre. Også i Fotovisning kan du zoome inn / ut på bildene og justere farger og skjermlysstyrken. Ved å trykke på Frys-

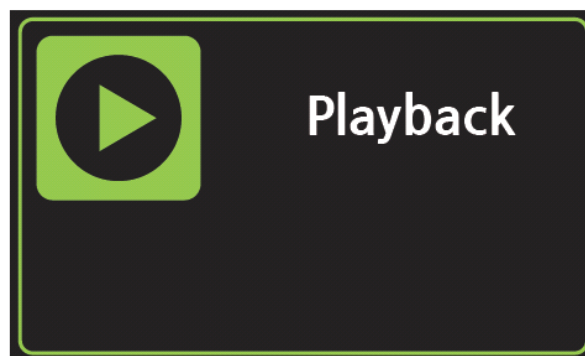

knappen vil du endre det forstørrede bildet til sin opprinnelige størrelse. Hvis du ønsker å slette bildet på skjermen trykk på joysticken. Trykk på joysticken en gang til




for å bekrefte sletting. Hvis du ikke ønsker å slette bildet på

skjermen kan du velge [NO] ved å flytte joysticken til venstre eller høyre og trykke på joysticken for å bekrefte.


### Lysstyrke på skjermen

Du kan juster lysstyrken på skjermen til 5 ulike nivåer.

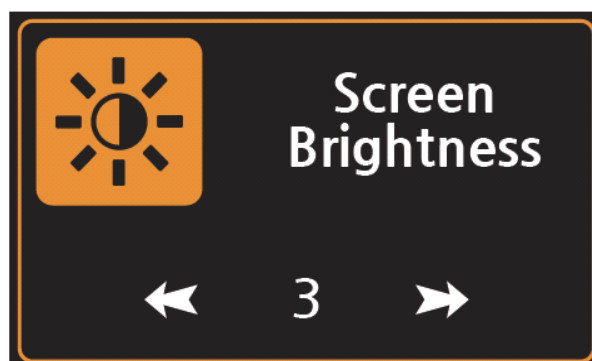

### LED lys

Dette gir deg mulighet til å slå av/på LED lyset.

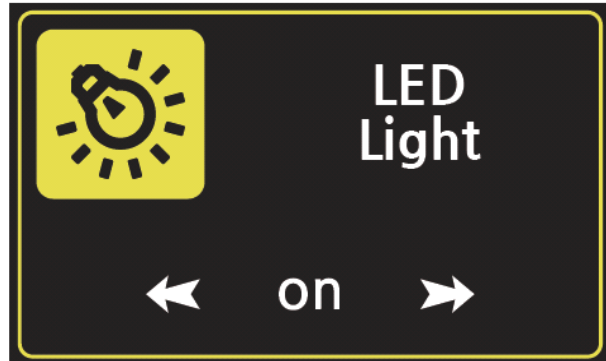


### Lydstyrke

Dette gir deg mulighet til å justere lydstyrken i 5 ulike nivåer.



### Personlige innstillinger

Hvis du velger [Lagre] kan du lagre dine personlige innstillinger for farger, modus, lysstyrke, LED lys status og lydvolument. Du kan velge [tilbake] for å gå tilbake til de lagrede personlige innstillinger.

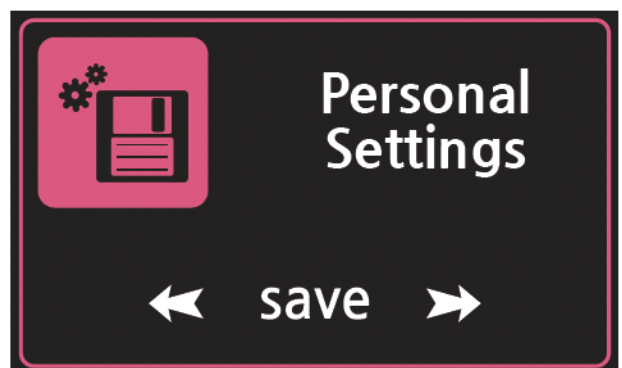

## Tekniske data

Forstørring .....	0.3x ~ 275x (inkludert digital zoom)
Forstørring .....	0.3x - 50x (i live-bilde)
Forstørring med stativ ute .....	1.8x - 14x
Farger .....	Naturlige farger
	Hvit tekst på sort bakgrunn
	Svart tekst på hvit bakgrunn
	Gul tekst på sort bakgrunn
	Svart tekst på gul bakgrunn
	Grønn tekst på svart bakgrunn
	Blå tekst på gul bakgrunn
	Gul tekst på blå bakgrunn
Skjerm .....	7" widescreen TFT-LCD (16:9)
SD kort .....	Max 64GB SD kort støtte
Batteri .....	Oppladbart Lithium batteri
Brukstid .....	Ca 4 timer på lysnivå tre
Ladetid .....	Ca 4 timer
Vekt .....	535 gram
Størrelse .....	200mm x 146mm x 25mm
Brukstemperatur .....	0 – 35 grader