



Hei,

Programvare oppdatering Versjon 8.2 vil fra i morgen 7.3.19 være tilgjengelig for din OrCam MyEye 2.

Versjon 8.2 har noen spennende nye funksjoner som vil gi deg flere funksjoner I din OrCam MyEye / MyReader. Under er det listet opp disse funksjonene.

Bluetooth tilkobling – koble din enhet til Bluetooth hodetelefoner eller høyttaler. (Tilkobling via innstillingsmenyen i din enhet. Gå til aktiver parring av Blåtann I hodetelefonen eller høyttaler).

Barkode læring (trykk og hold på touch linja for å legge til en ny barkode. Følg anvisningene) Barkoden må holdes foran kameraet. (Gjelder bare OrCam MyEye).

Ny språk mulighet- Bytt mellom system språk på din enhet. Gjøres i innstillingsmenyen på enheten. Du kan velge mellom Norsk og Engelsk menyspråk.

Tale kommandoer- Er tilgjengelige ved bruk av engelsk språkmeny. Ta kontakt for informasjon.

OrCam tutorial modus – tillater nye brukere å trene på Basic funksjoner I OrCam 2.0. Gjøres via innstillingsmenyen

Stille hvilemodus – Når enheten ikke har vært I bruke en tid vil den automatisk gå I hvilemodus. Hvile modus vil bare bli annonsert med et lite bip. Våkne opp, vil også bare gi signalet bip.

For fullstendige instruksjoner om hvordan du bruker OrCam MyEye eller OrCam MyReader- enheten med versjon 8.2, vennligst se den oppdaterte brukerhåndboken på OrCam- websiden.

Hvordan oppdatere til versjon 8.2

Se instruksjonene nedenfor for en trinnvis veiledning for å oppdatere OrCam MyEye 2-programvaren.

Dersom du allerede har koblet deg til et nettverk.

- Slå på enheten, sett i laderen. Du må være på det WiFi nettverket du koblet din OrCam til.
- Din enhet vil automatisk koble seg til ditt WiFi nettverk og laste ned oppdateringen, for så å installere den.
- Følg lyd instruksjonene for å komplettere oppdateringen.
- Lades opp etter oppdateringen.

Hvordan koble OrCam til et WiFi nettverk for programvare oppdatering.

- Først pass på at du er lokalisert til et nettverk som er passord beskyttet du har tilgang til.
- Koble din OrCam MyEye 2 til laderen og sett i gang landingen.
- På en PC eller smart telefon, gå til <https://www.orcam.com/en/wifiset/>
- Skriv inn din WiFi nettverks navn og passord, og trykk knappen "Generer QR kode."
- En QR kode vil komme frem. Gå deretter inn i menyen til OrCam under generelle innstillinger og WIFI. Trykk koble til WIFI. Pek så OrCam MyEye mot QR koden og trykk på linjen .
- Kameraet vill skanne QR koden. Hold kameraet foran QR koden til prosessen er ferdig. Den vil plinge og gi flere pipe lyder når den kobler seg til WiFi nettverket.
- Når den er tilkoblet vil ned lastingene starte og deretter starte innstalleringen. Følg lyd instruksjonene for å komplettere oppdateringen.
-

Dersom du har spørsmål så ta kontakt med oss.

SynSupport Nordic Eye

Tlf: 63825700

Mail: post@nordiceye.no