

Oversikt over menyen i OrCam MyEye 2 / MyReader 2.

Versjon 8.2, Oppdatering Mars 2019 .

For å gå inn i menyen, hold inne av/på knapp mens du sveiper på berøringslinjen.

Se også https://youtu.be/5BKm_NKZ6vM hvordan man går inn i menyen til OrCam.

Merk: For å gå ut av lydmenyen fra hovedmenyen, eller for å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på berøringslinjen to ganger i rask rekkefølge.

1. **Lesehastighet** (ord per minutt): Angi mellom 100 (veldig sakte) og 300 (veldig rask), standard er 160.

2. **Endre volum:** sett mellom 1 (veldig lavt) og 10 (veldig høyt).

3. **Lesinnstillinger:** inneholder forskjellige lesekonfigurasjoner;

3.1. **Datoformat:** måned / dag / år eller dag / måned / år.

3.2. **Automatisk sidegjenkjenning:** velg aktivert (standard) eller deaktivert.

3.3. **Automatisk sidegjenkjenningstid:** Angi mellom 2-10 sekunder (standard er 3 sekunder).

3.4. **Lese navigering:** velg aktivert (standard) eller deaktivert.

3.5. **Lese navigasjons pause lyd :** bestemmer pausetiden i lesemodus før du stopper lesemodus. Pausetiden kan settes mellom 30 sekunder og 5 minutter.

3.6. **Lese navigasjons pause-tid:** bestemmer pausetiden i lesetilstand før du stopper lesebehandlingen.

4. **Språkinnstillinger:** inneholder et sett med språkkonfigurasjoner;

4.1. **System språk:** Velg mellom tilgjengelige språk for ditt systemgrensesnitt.

4.2. **Lesespråk:** Velg mellom tilgjengelige språk for tekstavlesning.

5. **Bevegelse (gest) innstillinger:** inneholder et sett med gest konfigurasjoner;

5.1. **Stopp bevegelse:** aktivert (standard) eller deaktivert.

5.2. **Klokke bevegelse *:** aktivert (standard) eller deaktivert.

5.3. **Følsomhet på bevegelse:** Høy, Middels eller Lav.

6. **Meny for ansiktsinnstillinger *:** inneholder ansiktsgjenkjenningskonfigurasjoner;

6.1. **Innstillinger for ansiktsgjenkjenning:** manuell, automatisk og fullautomatisk, samt om du vil at hele innstillingen skal være aktivert (standard) eller helt deaktivert.

6.2. **Ansiktsgjenkjenningstid:** Denne funksjonen styrer hvor ofte enheten vil annonsere et kjent ansikt. Enheten vil gjenta ansiktets navn mellom 5 sekunder og 10 minutter; Standardinnstillingen er 30 sekunder.

6.3. **Gjennomgå lagrede ansikter:** gjør det mulig å fjerne et enkelt ansikt fra enhetens minne eller ta opp navnet på nytt. Du kan også lære flere bilder av samme person.

6.4. **Slett alle ansikter:** Gjør det mulig å fjerne alle lagrede ansikter fra enhetens minne samtidig.

6.5. **Ansiktsgjenkjenningsnivå:** Angi mellom lavt, middels (standard) og høyt.

6.6. **Ansikt Læringsinstruksjoner:**

7. **Produkter, strekkoder, sedler og farger Anerkjennelsesinnstillinger *:** inneholder et sett med identifikasjons innstillinger;

7.1. **Gjennomgå lagrede produkter:** gjør det mulig å fjerne et enkelt produkt fra enhetens minne eller ta opp navnet på produktet på nytt.

7.2. **Slett alle produkter:** gjør det mulig å fjerne alle lagrede produkter fra enhetens minne samtidig.

7.3. **Produktgjenkjenning:** aktivert eller deaktivert (som standard).

7.4. **Gjennomgå lagrede strekkoder:** gjør det mulig å fjerne et enkelt produkt fra enhetens minne eller ta opp navnet på produktet på nytt.

7.5. **Slett alle strekkoder:** Gjør det mulig å fjerne alle lagrede strekkoder fra enhetens minne samtidig.

7.6. **Strekkode innstillinger for gjenkjenning:** innstillingsalternativer: manuell ved å peke, automatisk (aktivert som standard) eller helt deaktivert.

7.7. **Sedler innstillinger for gjenkjenning:** innstillingsalternativer: manuell med pek, automatisk (aktivert som standard) eller helt deaktivert.



7.8. **Sedler Valutainnstillinger:** aktiverer eller deaktiverer valutaer. Som standard er alle relevante valutaer av en bestemt lokalitet aktivert.

7.9. **Fargegjenkjenning:** aktivert (som standard) eller deaktivert.

8. **Tilkoblingsinnstillings innstillinger:** inneholder konfigurasjoner for Wi-Fi og Bluetooth;

8.1. **Bluetooth:** Koble til høyttalere eller øretelefoner for lyd ut.

8.2. **Wi-Fi:** Koble til Wi-Fi for programvareoppdateringer.

9. **Generell innstillingsmeny:** inneholder flere avanserte konfigurasjoner;

9.1. **Endre stemme:** Velg mellom tilgjengelige mannlige og kvinnelige stemmer.

9.2. **Angi dato og klokkeslett:** angi klokkeslett, minutt, år, måned og dag og tidssone.

9.3. **Opplæringsmodus:** starte den innebygde opplæringsmodus.

9.4. **Tid for automatisk dvale modus:** Angi mellom 1 minutt og 30 minutter.

9.5. **Lyd tilbakemelding:** sett tilbakemelding lyd på .

9.6. **Tilbakestill alle brukerinntillinger til standard:** Gjenoppretter alle innstillinger til fabrikkinnstillinger.

9.7. **Kamera lyskompatibilitet:** Velg mellom Europa 50Hz eller USA 60Hz.

9.8. **Touch Bar sensitivitet:** Denne funksjonen lar deg kontrollere følsomheten til Touch linja til lav / medium / høy.

9.9. **Meldinger om lysforhold:** aktivert (som standard) eller deaktivert.

9.10. **Auto lys:** aktivert (som standard) eller deaktivert.

9.11. **Stemmekommandoer:** aktivert (som standard) eller deaktivert.

9.12. **Kontaktinformasjon for OrCam:** kunngjør OrCams kontaktinformasjon.

9.13. **Enhets-serienummer:** kunngjør enhetens serienummer.

9.14. **Programvareversjonsinfo:** kunngjør programvareversjonen som er installert på enheten.

10. **Avslutt:** dobbeltklikk for å gå ut av innstillingsmenyen.

SynSupport Nordic Eye

Tlf: 63825700

Epost: postnordiceye.no